

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート 31071000

レネロ皮膚バリアシート

RUGFUS

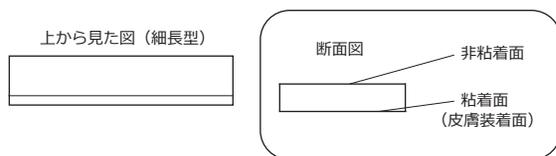
ラグファス

【禁忌・禁止】

○表皮の形成されていない開放創および粘膜には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性のあるシリコンシートで、粘着性のある面と粘着性のないシリコン面からなる。種類によって長さや面積の異なるものがある。

【構造図】**【使用目的又は効果】**

外部の汚染物質から傷あとなどの皮膚部位を保護するために皮膚に粘着するシリコンシートです。

【使用方法等】

1. 貼付部位の汗や汚れ等を清潔な布などで拭き取ります。
2. 容器の蓋を開け付属のヘラで本品を取り出し、開封時上面の装着面(粘着面)を傷あと等の皮膚面に貼ります。
3. 清潔を保つため、シリコンシートは汚れたら水洗いをして乾かしてから繰り返しご使用ください。(シートは約1か月使用できます。)
4. 本品は、毎日なるべく24時間続けて使用することをおすすめします。
5. 新品交換を含め6ヶ月を目処として継続使用してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 装着面に付着した皮脂等の汚れは、毎日洗い流してください。粘着面を軽くこするように洗い、たわし等の器具は使用しないでください。
2. 洗ったあとは装着面を上にし、自然乾燥で乾かしてください。ドライヤー等の加熱乾燥しないでください。本品を変形、変性させるおそれがあります。
3. シリコンシートは繰り返し約1か月使用できますが、落ちない汚れや粘着力の低下がある場合は、新しいシリコンシートに交換してください。
4. 伸縮性のあるシリコンシートですが、過度に引っ張ると破損するおそれがありますのでご注意ください。
5. 入浴時には取り外してください。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

1. 製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 本品の使用中に皮膚のかゆみ、赤みなどの症状があらわれた場合はただちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
3. 本品を口や鼻に入れると窒息の危険がありますので、小児及び監督を必要とする方の手の届かないところに保管してください。
4. 本品は可燃物ですので、火のそばや熱いところには置かないでください。
5. 排水管などの詰まりの原因になりますので、洗面所、トイレ等には流さないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
外箱の使用期限欄を参照してください。(自己認証により設定)

【包装】

2シート/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・製造販売

レネロファーマ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-24 第二佐野ビル

電話番号：03-6277-0897