

医療機器届出番号 13B1X10185000006

一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート
レネロ皮膚バリアシート

RUGFUS
ラグファス




～切開手術痕や腹腔鏡手術痕などに～

手術の切開の傷あとが **肥厚性瘢痕・ケロイド** にならないように早めのアフターケアが重要です。

ケロイドの原因

ケロイドは、「持続的な緊張によって遷延する炎症」が原因です。主にやけど、ケガ、手術が発端ですが、ニキビや虫刺されなどでも軽度の皮膚損傷でも発生することはあります。皮膚は傷を受けると傷あとが残りますが、その程度は傷の性質や部位、体質によって治り方が異なります。通常は時間の経過とともに自然にもとの皮膚に戻り、傷あとは目立たなくなります。しかし、深い傷や手術などで、特に下腹部、肩や胸にできた傷は、一旦ふさがったように見えても数ヶ月の内に赤く盛り上がってくることがあります。一度症状が出てしまうと赤く盛り上がった瘢痕はなかなか平らになりません。放っておくと傷の範囲を超えて大きく広がってくる場合があります。

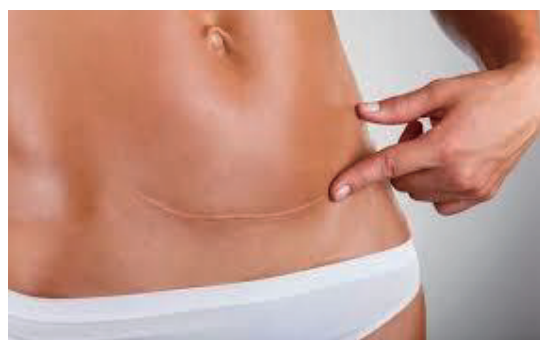

ケロイドの予防

傷が塞がった後（術後は抜糸の後）毎日貼ってください。傷が治ったように見えても、後から傷あとが盛り上がってくることがあります。半年くらいを目安に使用を続けることをおすすめします。

RUGFUS は洗って繰り返し使用が可能で、とても経済的です。保管時はゴミなどが付かないように、必ず専用ケースに粘着面を上にして入れ、蓋をしてください。粘着力が弱くなったら新しいものに取り替えてください。はがす時などに強く引っ張ったりすると破損してしまう恐れがありますのでご注意ください。 ※詳しくは添付文書をお読みください。

レネロ皮膚バリアシート「RUGFUS（ラグファス）」は、傷あとに直接貼って下記主な3つの作用でケロイドを予防します。

- 1) 創部の緊張を和らげる
- 2) 創部の安静を保つ
- 3) 保湿により炎症を防ぐ

(税抜)	
商品名	レネロ皮膚バリアシート RUGFUS
医療機器番号	13B1X10185000006
JAN	4573173720182
希望小売価格	4,700 円
サイズ	160mm×25mm (2シート入)



レネロファーマ株式会社
東京都港区南麻布 5-10-24 第二佐野ビル
<http://renelo.shizuka-gr.com>